

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZYŁBICY OCHRONNEJ ISv1




1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Wyrób chroniący usta i nos przed kontaktem z czynnikami szkodliwymi.

Zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych.

2. ZESTAW ZAWIERA:

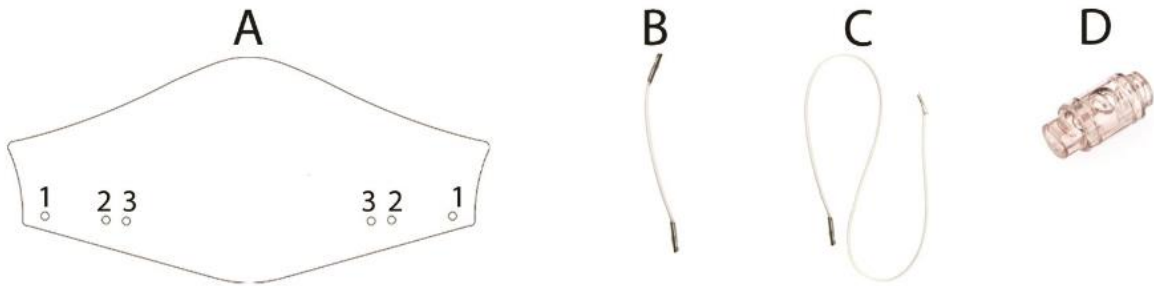

- A. 1 szt. przezroczysta osłona plastikowa A-Pet
- B. 1 szt. gumka stabilizująca na brodę- 9 cm
- C. 1 szt. gumka nośna – 46 cm
- D. 1 szt. stoper gumki – pełni funkcję regulacji długości gumki trzymającej maskę (na karku)

Przed pierwszym użyciem należy jeszcze raz zdezynfekować przyłbicę.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przez pierwszy otwór nr 1 strony prawej przezroczystej przesłony „A” przekładamy metalowy koniec gumki nośnej „C”, czynność powtarzamy po stronie lewej. Następnie przez drugi otwór nr 2 lub trzeci nr 3 otwór strony lewej pamiętając aby numer otworu był ten sam.

Na koniec łapiemy gumkę nośną „C” tak, aby powstało „oczko” i przetykamy gumkę na stoper gumki „D”, którym podczas dopasowywania maseczki na twarzy regulujemy jej długość tak, aby maseczka trzymała się stabilnie a gumki nie uwierały.

Prawidłowo założona maseczka nie powinna dotykać nosa. Jeśli jest inaczej należy zmienić pozycję gumki stabilizującej z otworu 3 na 2 lub poluzować stoper.

4. KONSERWACJA

Po zabrudzeniu należy wypiąć przesłonę z gumek.

Użyć preparatu odkażającego oraz płynu do mycia z alkoholem a następnie osuszyć powierzchnię ściereczką z mikrofibry. Pozwala to na zachowanie dobrej przejrzystości przyłbicy.

Przesłona może być użyta ponownie.

Aby zachować jak najdłuższą dobrą jakość osłony twarzy należy:

- Kłaść osłonę twarzy tak aby powierzchnia szybki nie stykała się z innymi przedmiotami
- Nie czyścić osłony na sucho
- Do czyszczenia należy używać wody z mydłem lub innym łagodnym środkiem myjącym

NIE WOLNO STOSOWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW TAKICH JAK BENZEN, BENZYNA, ACETON ITP.

Producent nie ponosi odpowiedzialność i za konsekwencje użycia produktu niezgodnie z instrukcją i jej przeznaczeniem

5. MAGAZYNOWANIE

Należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nie nasłonecznionych, z dala od urządzeń grzejnych

6. WARUNKI EKSPLOATACJI

Ze względów higienicznych i zagrożeniem związanym z COVID19 zaleca się stosowanie osłony przez jednego użytkownika.

**UWAGA!!! PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZDJĄĆ Z KAŻDEJ STRONY FOLIĘ
ZABEZPIECZAJĄCĄ Z PRZESŁONY**

isopack